


LipStick - Mouse a bocca

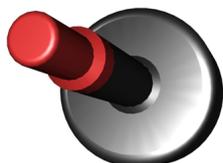

Mouse a bocca LipStick. Dispositivo per il controllo delle funzioni del mouse tramite i movimenti della bocca e/o labbra.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 1817,80

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 1490,00

Ammontare IVA € 327,80

Produttore: [Shannon Electronics](#)

Descrizione

LipStick, è un mouse a bocca.

È un mouse alternativo, una soluzione ottimale per coloro che non sono in grado di gestire un mouse convenzionale.

Tutte le funzioni mouse vengono controllate con la bocca: il cursore sullo schermo segue i movimenti della bocca ed i pulsanti vengono azionati dalle labbra.

Forza di controllo

Il cursore viene mosso con movimenti minimi del capo e la forza necessaria a produrre il movimento del cursore può essere regolata con parametri che vanno da un minimo molto ridotto a una forza molto grande.

Impostando la sensibilità massima si otterrà il movimento del cursore con meno di 10 grammi di forza.

Controllo del cursore molto accurato

LipStick permette un controllo cursore molto accurato sia per movimenti molto piccoli che per movimenti molto grandi. I movimenti del cursore sono armoniosi e scorrevoli, liberi da balzi o saltelli.

L'accuratezza è tale da rendere possibilissimo anche il controllo pixel per pixel. Dotato di accelerazione automatica per movimenti grandi e veloci.

Cliccare con le labbra

I click sinistro e destro del mouse si ottengono alzando il labbro superiore o inferiore anziché soffiare o succhiare come per altri mouse a bocca. Anche il trascinarsi è facile!

Compatibilità

LipStick è compatibile con i s.o. Windows, Apple, Linux o Android basta una connessione USB.

È compatibile con la maggior parte dei tablet e smartphone (dispositivi Android devono essere compatibili [OTG](#)).

Non ha limiti di funzionalità sui diversi applicativi del computer: può essere quindi utilizzato per la gestione completa del computer, la scrittura, la navigazione in internet, i giochi e con qualsiasi applicativo Windows.

Requisiti

- Porta USB
- Sistema operativo che supporti le funzioni USB

Dotazione

LipStick viene fornito col proprio software per ambiente Windows per le impostazioni di alcuni parametri.

Una volta definiti i parametri d'uso, il software non serve più. Basta collegare il mouse LipStick al proprio dispositivo, sia esso un computer o un tablet o uno smartphone attraverso la porta USB ed il mouse viene riconosciuto automaticamente senza la necessità di alcun driver.

Accessori

LipStick Mouse dev'essere fissato ad un supporto come il [supporto per Lipstick](#) o il [braccio articolato Magic Arm](#) (a scelta, entrambi non in dotazione) per poterlo posizionare adeguatamente rispetto all'utilizzatore.

Consigli

Per usare LipStick visionate il video seguente:

Video (in inglese)

Per capire come pulire/sanificare LipStick visionate il video seguente:

Video

INFO

- Connettore: USB
- Dimensioni: 13 cm x 21 cm x 7 cm
- Compatibilità: Windows, Mac, Linux, Android
- Disponibilità: su richiesta