

n-Abler Trackball Pro



Mouse trackball, con 6 pulsanti, in grado di compensare eventuali tremori dell'utilizzatore..

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 439,20

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 360,00

Ammontare IVA € 79,20

Produttore: [Pretorian](#)

Descrizione

DESCRIZIONE DA RIVEDERE PER TRACKBALL

n-Abler Joystick Pro è un mouse a leva con scudo di protezione e cinque tasti disposti intorno alla leva più un sesto tastino posto lateralmente.

Lo spostamento del puntatore si ottiene, muovendo la leva nella direzione in cui si vuole spostare il puntatore del mouse sul monitor.

Questo mouse è stato progettato per persone con difficoltà motorie agli arti superiori, scarsa coordinazione oculo-manuale, limitata destrezza manuale, spasmi muscolari involontari e tremori alla mano o a livello del polso.

La caratteristica anti-tremore è importante in modo particolare per chiunque abbia tremori o spasmi muscolari involontari e per persone anziane con difficoltà motorie.

La leva, di 5 cm di altezza, è del tutto simile a quella delle carrozzine elettroniche. Questo rende questo prodotto molto indicato a coloro che già utilizzano questo tipo di comando, rendendone immediato l'apprendimento di utilizzo.

Il mouse è configurato per l'uso con la mano destra, ma può essere facilmente riconfigurato per uso con mano sinistra.

I tasti permettono di controllare il click sinistro, il click destro, il doppio click, lo spostamento sugli assi cartesiani e il trascinamento. Il tasto dedicato al doppio click è anche quello per attivare la funzionalità anti-tremore, a quattro livelli: basso, medio, alto, disattivato.

Il sesto tastino laterale consente di regolare la velocità di spostamento del puntatore o per impostare la modalità di configurazione. La modalità di configurazione permette di cambiare l'orientamento del mouse, di impostare un lieve feedback sonoro alla pressione dei pulsanti, di definire se il mouse verrà usato con mano sinistra o destra (scambiando le funzioni dei pulsanti sinistro e destro. Tutte le modifiche saranno memorizzate direttamente nel dispositivo, per cui al prossimo utilizzo il mouse avrà le impostazioni di come l'avete lasciato.

Mouse: n-Abler Trackball Pro

Lateralmente sono presenti due ingressi per sensori esterni per le funzioni click sinistro, click destro, trascinamento, attivabili con due sensori (non inclusi).

Anti-tremore: sono disponibili tre impostazioni per compensare il grado di tremore dell'utente.

Per attivare la modalità Anti-Tremore, premere e tenere premuto il pulsante del doppio click (o comunque quello in basso a sinistra).

Il LED diventa arancione e l'unità emette un singolo 'beep' che indica che la modalità Anti-Tremore è impostata al livello più basso di compensazione. Per aumentare il livello di compensazione premere e tenere premuto il pulsante fino a sentire un 'beep', 'beep' che indica il livello intermedio.

Tenere premuto nuovamente il pulsante fino a emettere 'beep', 'beep', 'beep' che indica il grado più alto di compensazione.

Premendo e tenendo premuto nuovamente il pulsante si disattiva la modalità Anti-Tremore, indicata da un tono di cadente e il LED arancione si spegne.

Notare che l'impostazione anti-tremore selezionata viene mantenuta automaticamente nella memoria e richiamata al riavvio (ad esempio se il computer è spento)

Dotazione: manopola a T e sferica

Connettore: USB/ps2

Ingressi sensori: due

Compatibilità: Windows, Mac, Linux

Disponibilità: immediata