

## Interfaccia per sensori Android - Mouse 4 All Go



Usa il tuo smartphone o tablet Android con uno o due sensori

### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 242,78

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 199,00

Ammontare IVA € 43,78

Produttore: [Qinera](#)

### Descrizione

Mouse4all Go è una soluzione di accessibilità che consente di utilizzare un dispositivo Android, tablet o smartphone, con uno o due sensori eseguendo la scansione, senza toccare lo schermo. L'unica cosa che devi fare è installare l'applicazione "mouse4all" da Google Play, il software più completo per l'accesso a un dispositivo Android tramite la scansione, poi connettere questo dispositivo al tuo dispositivo mobile (Android versione 7 o successiva) e iniziare a utilizzare il tuo telefono o tablet da uno o anche due switch, nello stesso modo in cui lo faresti sul tuo laptop.

Sono previste tutte le funzioni: spostarsi sullo schermo, premere, trascinare, scorrimento verticale e orizzontale, zoom, pulsanti home e back, ecc.

Mouse4all Go è focalizzato nel rafforzare l'autonomia, poiché fornisce accesso a Internet, social media, giochi e ogni tipo di applicazione. Con questo dispositivo sarai in grado di spostarti attraverso lo schermo, premere, trascinare o scorrere semplicemente usando i tuoi sensori, senza dover mai toccare lo schermo.

Ti consente di accedere a qualsiasi app che hai nel telefono e di usarla normalmente, nonché di accedere alle funzioni Android che richiedono di premere i tasti fisici o digitali sul tuo dispositivo.

Il grande puntatore integrato ti aiuterà a localizzare il mouse sullo schermo. Inoltre, quando stai eseguendo un'azione speciale (come trascinare un oggetto) ti ricorderà l'azione che stai facendo con una piccola icona nella parte in alto a destra dello schermo.

Mouse4all Go è molto facile da usare: devi solo installare l'applicazione mouse4all da Google Play, collegare il cavo al telefono (incluso) e iniziare a usarlo. Ogni volta che si collega USB "Mouse4all Go" al connettore USB del tablet o del telefono, l'applicazione lo rileva e inizia a funzionare automaticamente, senza dover fare altro. Allo stesso modo, quando si scollega il cavo, l'app si spegne automaticamente. Ha un menu di configurazione completo accessibile dall'applicazione.

Grandi vantaggi ...

- ? Puntatore ingrandito: aiuto visivo con puntatore grande e assi intersecanti per identificare facilmente la posizione del puntatore.
- ? Fino a 2 sensori: possibilità di usare uno o due sensori.
- ? Personalizzabile: selezionare il menu. Scegli il colore e le dimensioni del puntatore. Regola i tempi e la velocità di scansione in base alle tue esigenze.
- ? Facile da installare: puoi iniziare a usare Mouse4all in pochi minuti. Seguire le istruzioni nella guida rapida inclusa nell'app.
- ? Applicazione gratuita inclusa con uso illimitato con Mouse4all Go.

Questo prodotto include tutto il necessario per il suo utilizzo immediato: il connettore USB per la connessione al dispositivo mobile e l'uso illimitato del software mouse4all.

## **CARATTERISTICHE:**

Disabilità fisiche: lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla, SLA, disturbi neuromuscolari ...

Paralisi cerebrale

Danno cerebrale: ictus, trauma cranico, ...

Difficoltà di apprendimento

## **MOUSE4ALL GO INCLUDE**

Hardware USB

La licenza per l'uso illimitato del software Mouse4all.

2 cavi per il collegamento a 2 diversi dispositivi Android

Cavo OTG-USB tipo C

Cavo OTG-microUSB

## **PREREQUISITI**

Mouse4all è compatibile con la maggior parte dei telefoni e tablet Android:

- Consigliato Android versione 7.0 o successiva.
- Il dispositivo viene fornito con 2 cavi OTG diversi
- Sono presenti ingressi per due [sensori](#)

**Prescrivibilità LEA:** 24.09.24.003

**Disponibilità:** su richiesta.