

Accoppiatore magnetico per stativi da carrozzina



Accoppiatore magnetico per stativi da carrozzina - Rehadapt.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 201,30

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 165,00

Ammontare IVA € 36,30

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Accoppiatore con un meccanismo di sgancio rapido per rimuovere facilmente l'intero stativo a partire dal morsetto attaccato al telaio della carrozzina.

Questo accessorio in due parti permette, senza l'utilizzo di alcuno strumento o chiave a brugola, di rimuovere lo stativo in sicurezza e praticità, lasciando attaccato alla carrozzina soltanto il morsetto iniziale specifico per la vostra carrozzina e metà di questo accoppiatore (la parte con la leva rossa nella foto [cod ARA711]).

Le due parti di questo componente sono unite da un magnete e bloccate fra di loro grazie ad una leva. La connessione -guidata dal magnete- garantisce un perfetto allineamento.

La leva manuale offre la massima sicurezza ed ergonomia. Aggiunge un ingombro di 38 mm.

La parte con la leva [cod ARA711] andrà fissata al morsetto, la parte col magnete [cod ARA710] andrà fissata allo stativo al quale si abbina il comunicatore.

Da utilizzare in abbinamento a [qualsiasi morsetto di stativi per carrozzina](#) di RehAdapt.

Le due parti sono acquistabili anche separatamente.

Se ad esempio si avesse uno stativo tipo [Monty 3D Plus Hd](#) montato su una carrozzina elettronica e fosse da spostare fra una statica da interni ed un passeggino, sarà necessario acquistare un esemplare completo di ARA687 e poi aggiungere due elementi con la leva rossa (ARA711 - a sinistra nella foto), oltre ai morsetti specifici uno per statica da interni uno per il passeggino.

Video Su come montare l'Accoppiatore Magnetico

Video Pulire & disinfettare

Disponibilità: Su richiesta.

Prescrivibilità (LEA 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)