

Interfaccia per sensori - Hook+



Interfaccia per 4 sensori per dispositivi iOS iPad, iPhone, iPod .

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 340,38

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 279,00

Ammontare IVA € 61,38

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Hook+ è una interfaccia per sensori approvata Apple MFi che permette una connessione via cavo affidabile ad iPad, iPhone o iPod touch con connettore Lightning.

Per iniziare basta collegare da uno a quattro sensori ad Hook+, attivare il controllo sensori e collegare il dispositivo Hook+ al vs dispositivo.

Hook+ utilizza il configuratore automatico per sensori e la prima volta che Hook+ viene usato con un dispositivo compatibile, questo configurerà automaticamente il dispositivo per usare scansione automatica con un solo sensore o scansione manuale con due sensori, in base a quanti sensori sono collegati ad Hook+.

Una volta eseguita la configurazione iniziale, i sensori possono essere manualmente riconfigurati a seconda delle necessità dell'utilizzatore.

Il configuratore automatico Apple dei sensori è disponibile solo con le interfacce per sensori approvate Apple MFi.

Una volta che Hook+ è connessa e Controllo Sensori è configurato, è possibile fare qualsiasi qualsiasi cosa con un sensore su un dispositivo iPad, iPhone o iPod touch, come leggere un eBook, scrivere una email, navigare in Internet, giocare, usare i dispositivi di controllo ambientale ed altro ancora!

NOTA1: Hook+ non è compatibile con le apps che utilizzano combinazioni di tasti per clicks. Hook+ utilizza il protocollo proprietario di Apple (HID Assistive Switch Control protocol) per i click dei sensori ed è compatibile con Controllo Sensori in iOS 7 or successivi.

Per accedere a Controllo Sensori, andare su Impostazioni App > Generale > Accessibilità > Controllo Sensori.

NOTA2: Se il vs dispositivo iOS non prevedesse un connettore di tipo Lightning, Hook+ non è utilizzabile. L'alternativa più semplice è rappresentata dall'[interfaccia/sensore Blue2](#).

CARATTERISTICHE:

- Connessione: porta Lightning
- Compatibilità: iOS 7 o successivi

Accessori Sensori: Interfaccia per sensori - Hook+

- Hook+ non ha una batteria interna, funziona fin tanto che il dispositivo cui è collegato ha carica.
- Mentre viene utilizzato Hook+ è possibile utilizzare la porta di alimentazione che si trova in Hook+ per caricare il proprio dispositivo iOS
- Ingressi per sensori: da 1 a 4 sensori con spinotto da 3,5 mm, mono. Con iOS 9, è possibile programmare fino a due comandi differenti per sensore, per un totale di otto diversi comandi da inviare tramite i sensori.

Prescrivibilità LEA: 24.09.24.003

Disponibilità: su richiesta.