

Mobii Guida Avvio Rapido

AVVIO

Collegare il cavo di alimentazione sul lato dell'unità.

Aspettare che si accenda la luce rossa sul davanti, quindi avviare il sistema premendo il pulsante di Avvio/ Spegnimento sul lato opposto. Il sistema si avvierà automaticamente e aprirà il menu delle applicazioni.

Utilizzare i **pulsanti su e giù** posti sul retro per **regolare l'altezza** del Mobii per adattarsi al piano del tavolo o alla superficie di proiezione.

Regolare il **cursore della messa a fuoco** per ottenere l'immagine più nitida possibile, il cursore si trova sulla parte superiore.

PULSANTI UTENTE

Utilizzare i **pulsanti Su, Giù, Sinistra e Destra** per navigare nel menu e il **pulsante OK/Invio** per eseguire l'applicazione evidenziata. Mentre sei nell'attività, premi le **frecce sinistra e destra** per selezionare un'impostazione, quindi **su e giù** per modificare la **velocità** degli effetti. Per visualizzare il menu, premere **OK/invio**. Modifica il volume utilizzando il controllo del volume.

SPEGNIMENTO

Premere il **pulsante di avvio e spegnimento** sul lato dell'unità e **attendere che la luce anteriore del proiettore diventi rossa prima di staccare la spina dal muro**. Il proiettore si spegne automaticamente.

#Verde 800 30 30 20

supportotecnico@easylabs.it

www.easylabs.it

easylabs
tecnologie assistive e multisensoriali