

6 MAGGIO 2021

# LUCI E COLORI COME MAI PRIMA D'ORA


Webinar introduttivo alla tecnologia Luminea.

easylabs


# EVOLUZIONE NATURALE


**easylabs**  
**la favelliana** www.logopedia.com  
materiali per lo sviluppo della comunicazione e del linguaggio

- Ausili a bassa tecnologia
- Materiali per la comunicazione e il linguaggio
- Ausili e Software per la CAA
- Gioco adattato
- Pallestra® La Favelliana
- Puntamento oculare
- Controllo ambientale
- STANZE MULTISENSORIALI

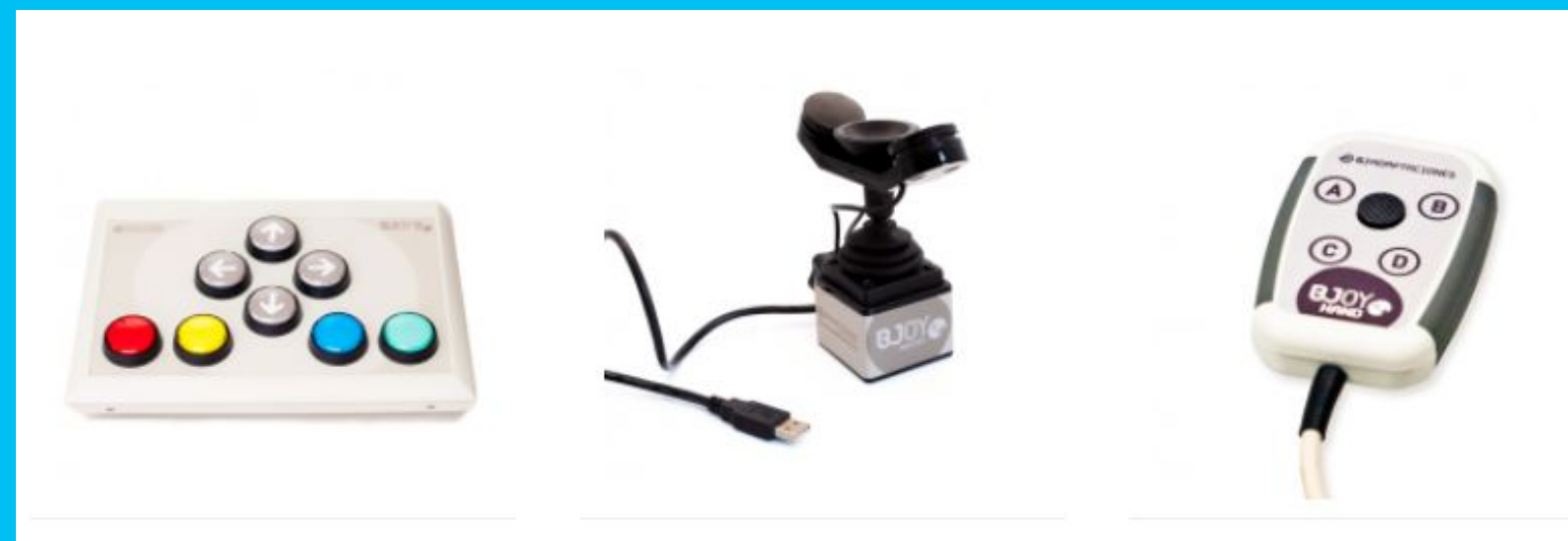

**easylabs**

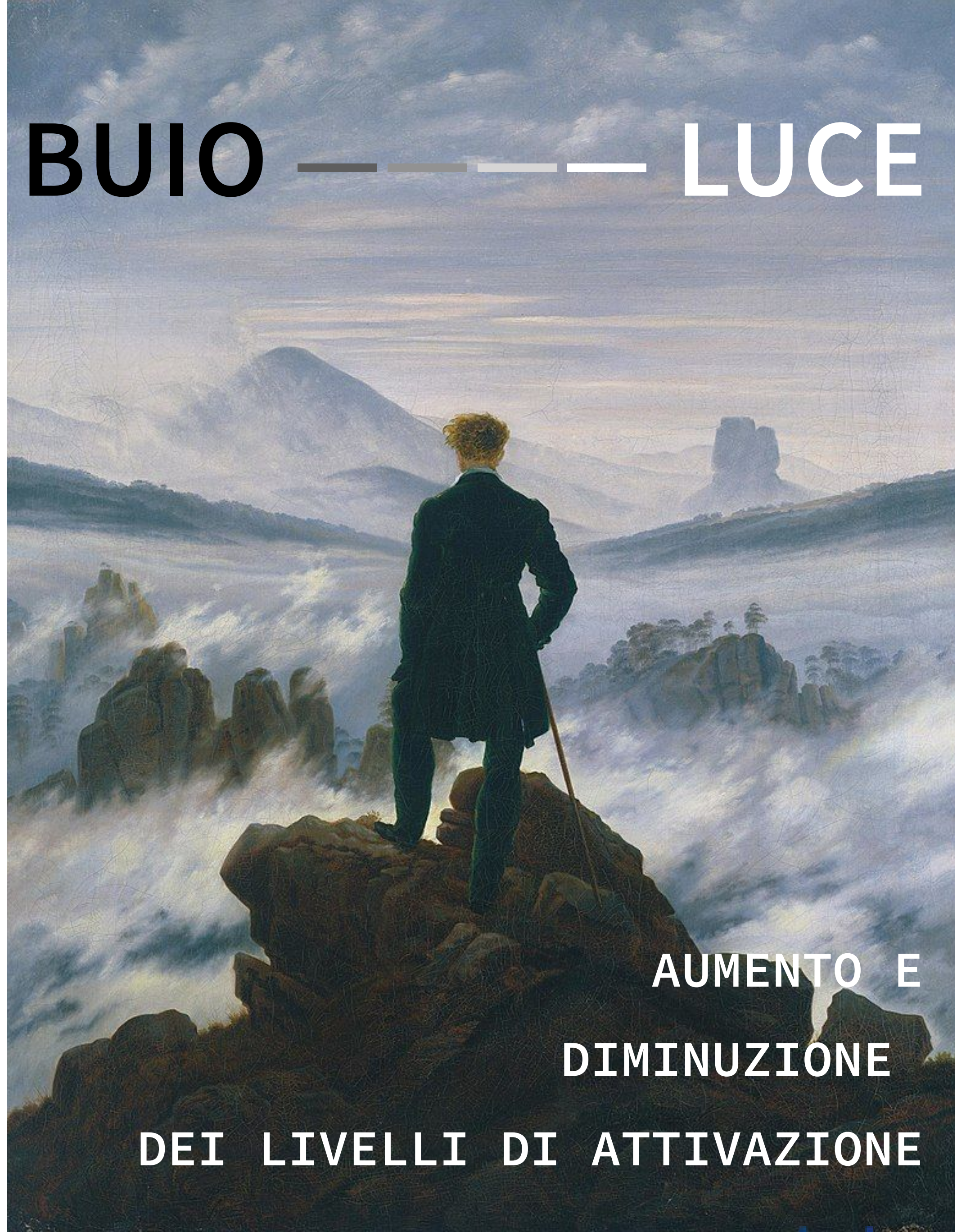

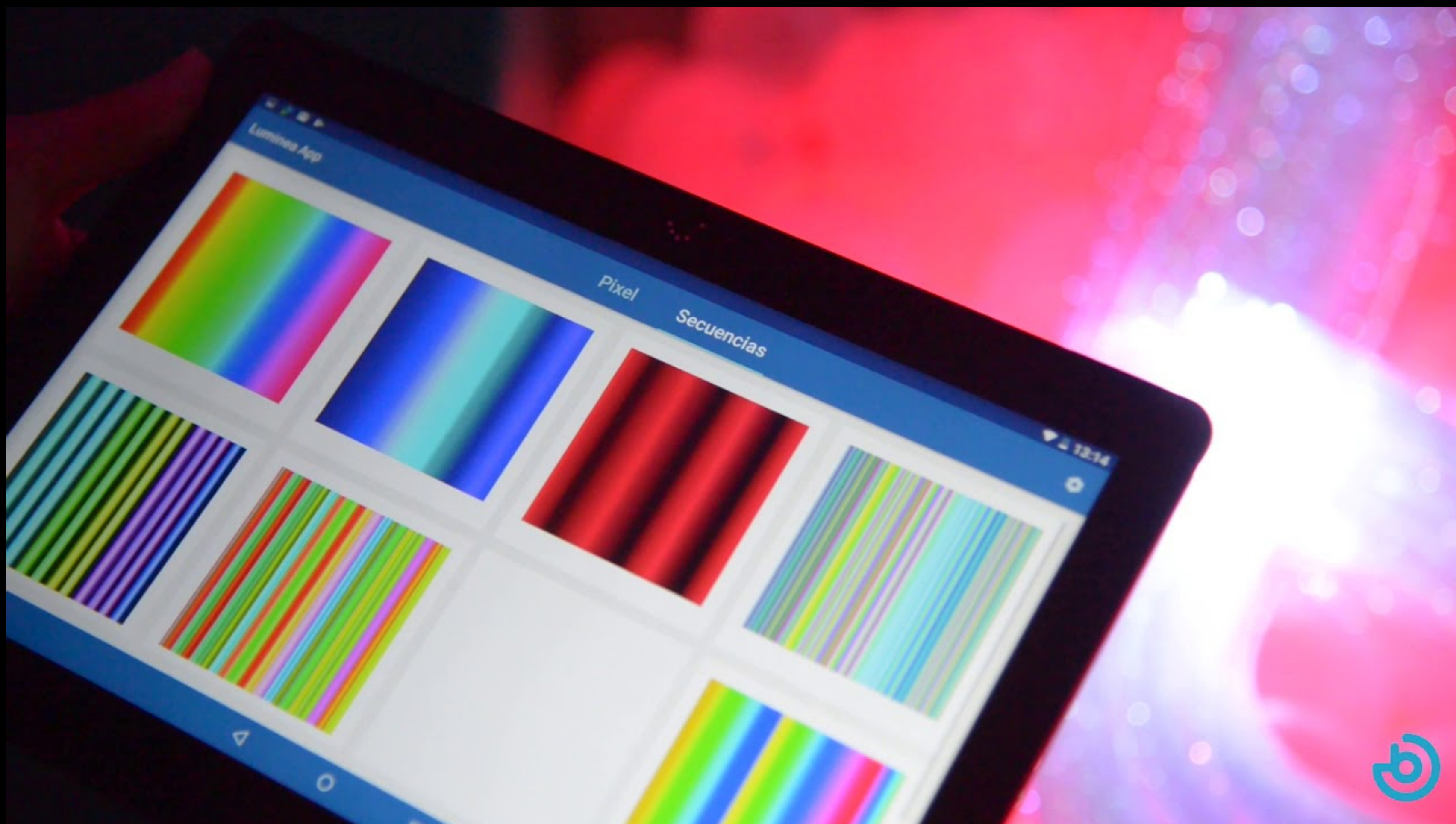

[LUMINEA - GUARDA IL VIDEO DI PRESENTAZIONE](#)

# LUMINEA



**DISPOSITIVI**

**LUMINEA APP**

**MODALITA' TOCCA COLORE**

**MODALITA' SEQUENZE**

**SISTEMA EDITABILE**


**COMPATIBILITA' -  
-SENSORI  
-SISTEMA SHX**

**ANGOLO LUMINEA**





**MANIPOLAZIONE, MOTRICITA' FINE**

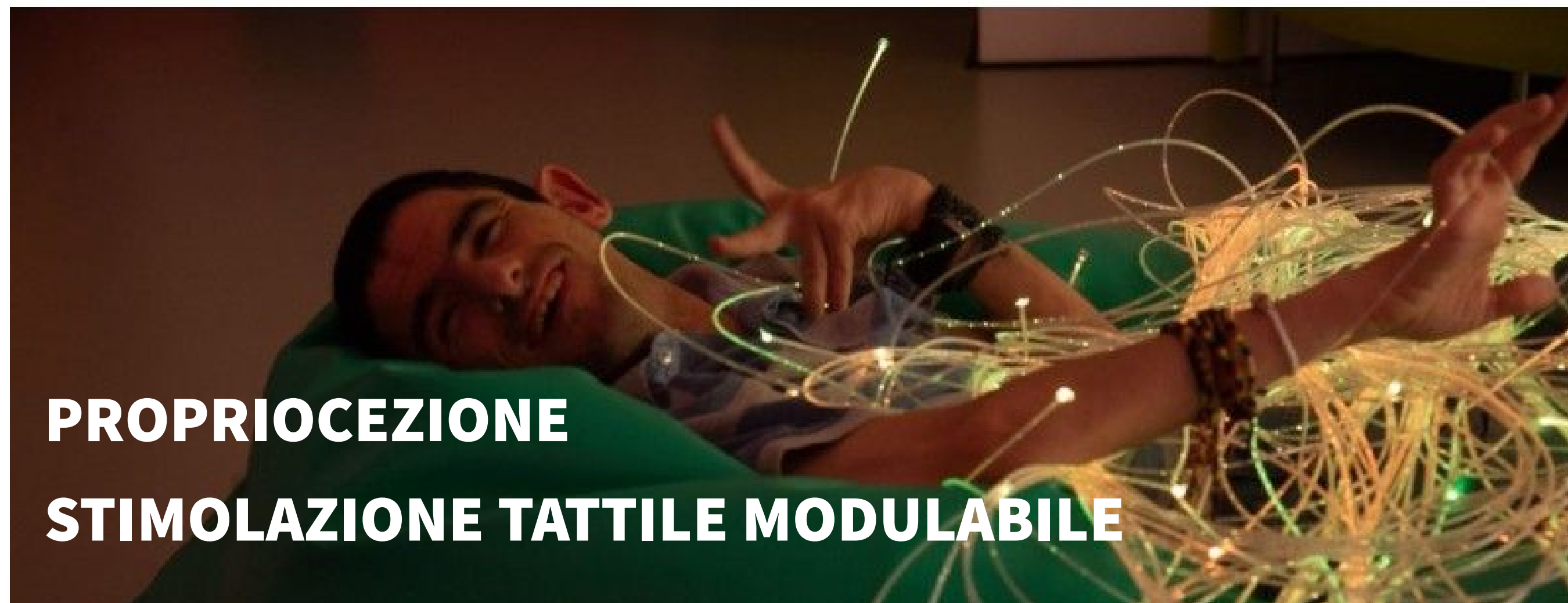

**PROPRIOCEZIONE  
STIMOLAZIONE TATTILE MODULABILE**

# DISPOSITIVI LUMINEA FIBRE OTTICHE



**ATTENZIONE CONDIVISA  
COMUNICAZIONE**

easy labs

ILLUMINAZIONE

RIATTIVAZIONE

PROPRIOCEZIONE

INSEGUIMENTO  
VISIVO

VIBRAZIONE

# DISPOSITIVI LUMINEA TUBO A BOLLE

ATTENZIONE CONDIVISA



COMUNICAZIONE...

easy labs

# LUMINEA APP



## MODALITA' SEQUENZE

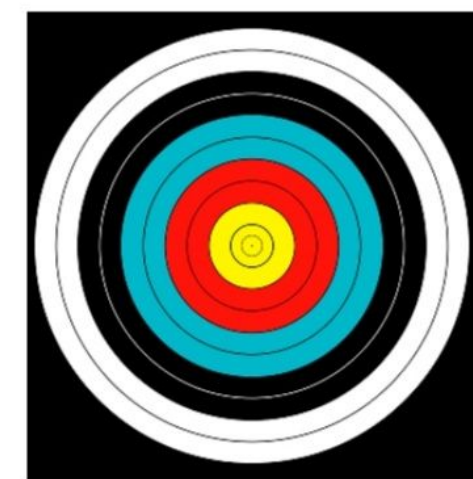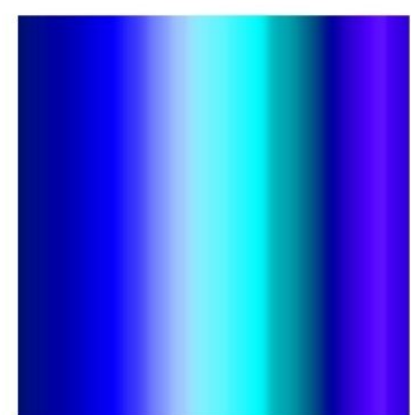

## MODALITA' TOCCA COLORE




TEMI  
TEXTURE  
LE TUE IMMAGINI



# LUMINEA APP - MODALITA' TOCCA COLORE

## OPZIONI E ATTIVITA'

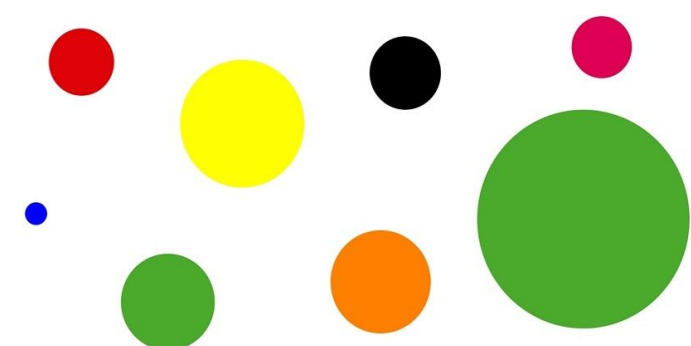

Nome dell'Attività



Colore Inattivo

Se tocchi questo colore l'illuminazione del dispositivo non cambia



Colore per spegnere

Toccano questo colore si spengono bolle ed illuminazione



Colore Magico

Questo colore è l'unico che farà accendere il dispositivo



Bolle sempre attive

Le bolle si attivano se tocchi qualsiasi colore, eccetto il colore di spegnimento



ELIMINA L'ATTIVITÀ

## 9. Di cosa profuma?

### OBIETTIVI

- Gnosie
- Aree di contenuto specifico
- Linguaggio

### MATERIALI

- App Luminea
- Fibre Luminea



### COME SI SVOLGE L'ATTIVITÀ

Seleziona l'icona con bande verticali di frutta nella schermata attività Pixel. Porta la frutta nella stanza. Benda i partecipanti e chiedi loro di annusare un frutto. Poi, guardando l'app, devono selezionare il frutto corrispondente.

### ALTRE IDEE

Crea e modifica la tua attività Pixel utilizzando le immagini di oggetti familiari che emanano profumo.

## 15. Il labirinto

### OBIETTIVI

- Attenzione e concentrazione
- Coordinazione visuo-motoria

### MATERIALI

- App Luminea
- Tubo a bolle Luminea
- Fibre Luminea



### COME SI SVOLGE L'ATTIVITÀ

Seleziona una delle attività a labirinto della schermata Tocca Colore. L'utente deve tracciare il percorso con il dito senza oltrepassare il bordo, altrimenti il tubo e le fibre ottiche si spegneranno.


### ALTRE IDEE

Prova a utilizzare una penna capacitiva per lavorare sulle abilità di pre-grafismo, oppure prova stando in piedi!

# LUMINEA APP - MODALITA' SEQUENZE

# CREA

TRANSIZIONI DI COLORI  
ASSOCIA UN BRANO MUSICALE




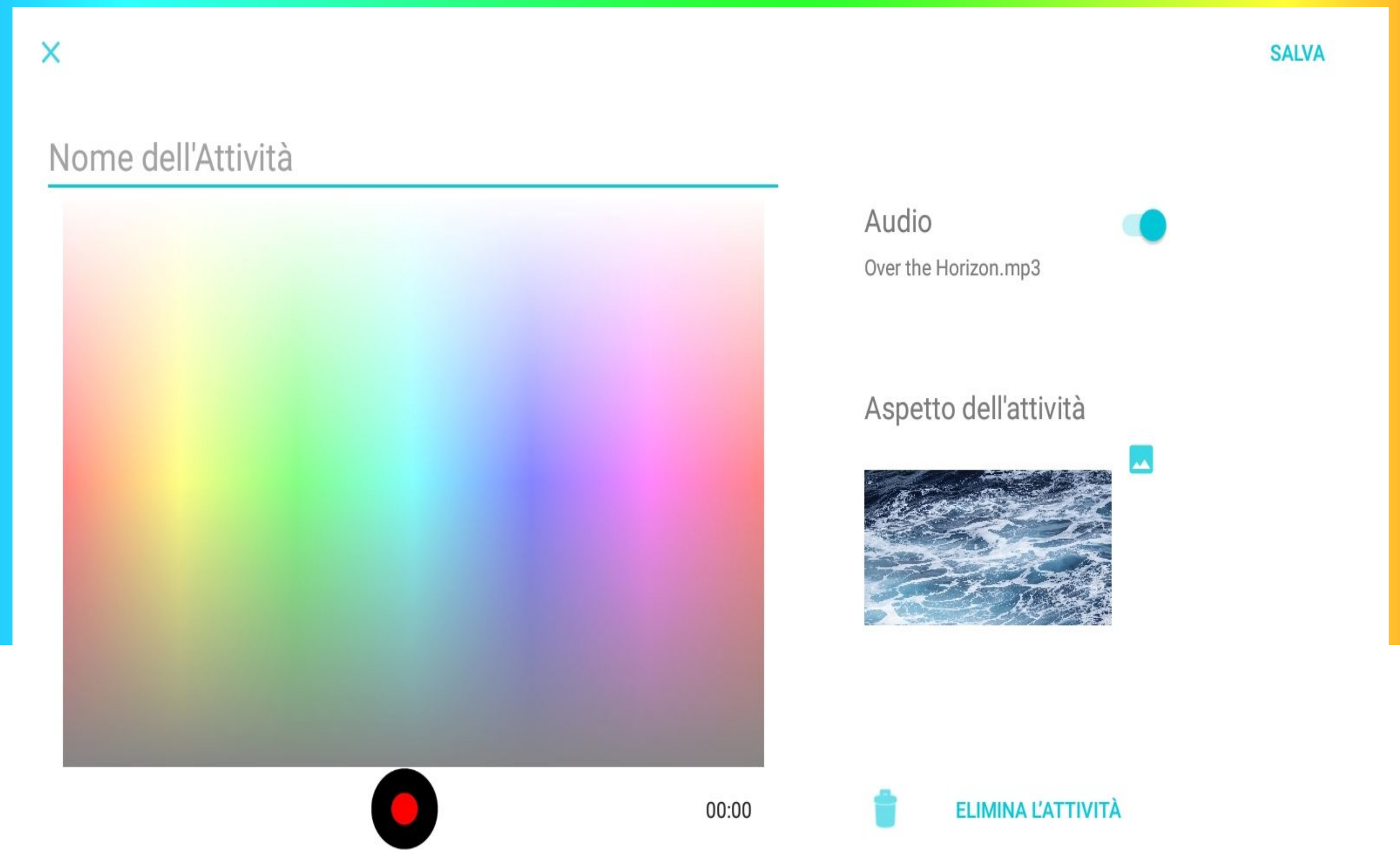


# ACCENDI LO SPETTACOLO

# I DISPOSITIVI LUMINEA

CLICCA SU IMMAGINI E TESTI PER ANDARE AI DETTAGLI SUL SITO

- [FIBRE OTTICHE 2m](#)
- [FIBRE OTTICHE 3m](#)
- [DOCCIA DI FIBRE OTTICHE](#)
- [TENDA DI FIBRE OTTICHE](#)
- [TUBO A BOLLE](#)
- [VASCA DI PALLINE](#)
- [ANGOLO LUMINEA](#)

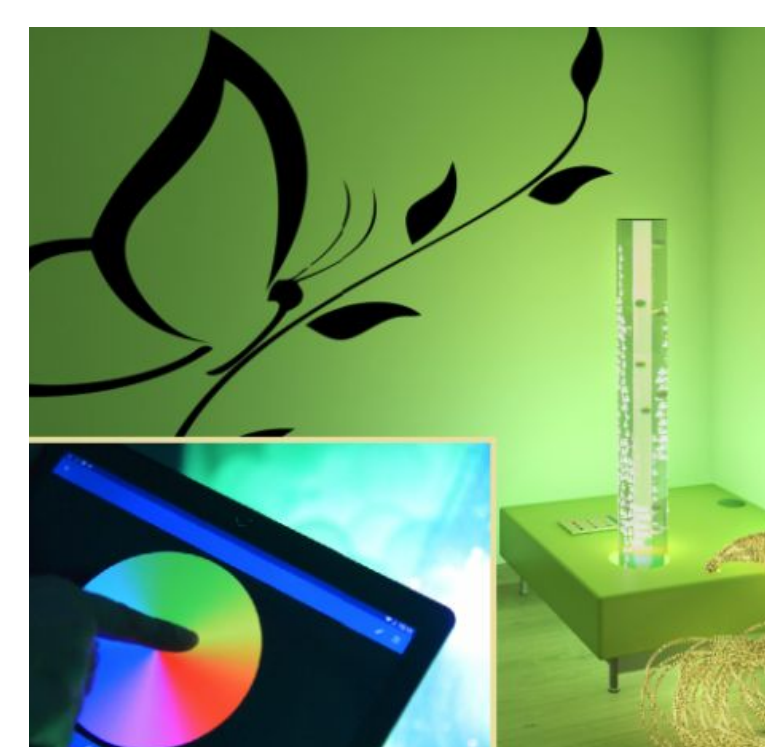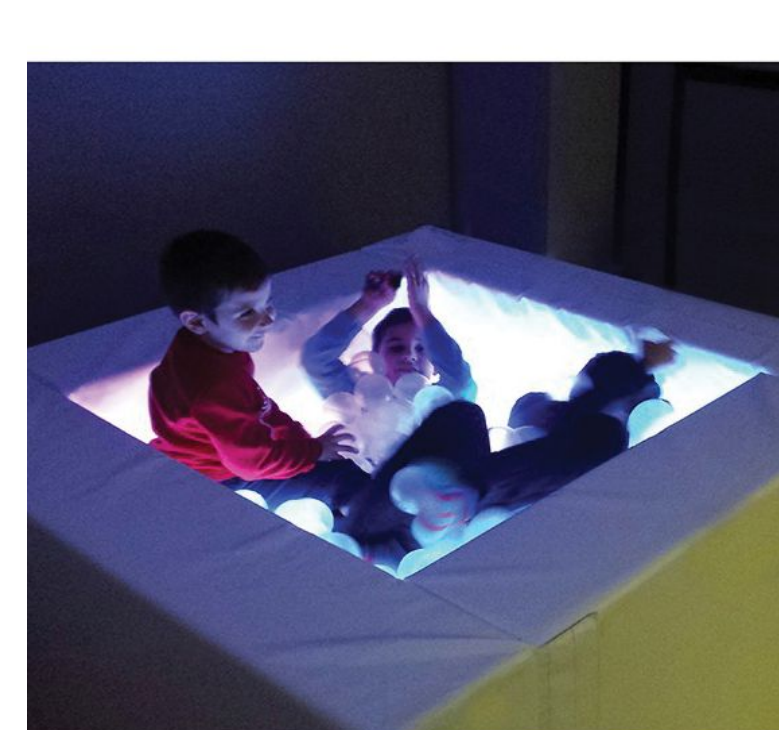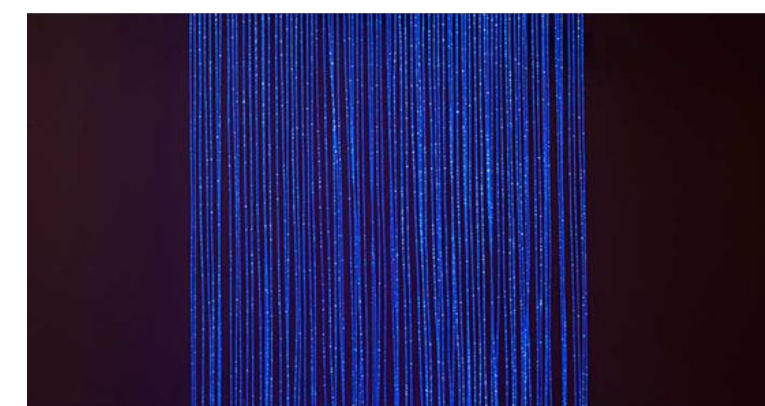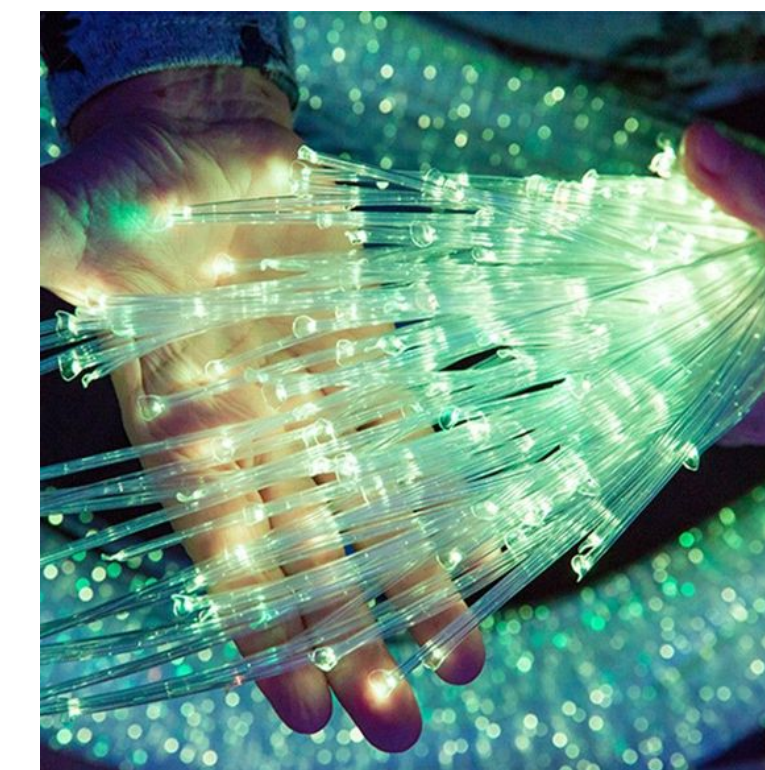


easylabs

# I CONTROLLERS LUMINEA


CLICCA SU IMMAGINI E TESTI PER ANDARE AI DETTAGLI SUL SITO

- [SENSORE BUTTON 1](#)
- [SENSORE BUTTON 6](#)
- [APP LUMINEA](#) APP
- [COMPATIBILITA' SHX](#)

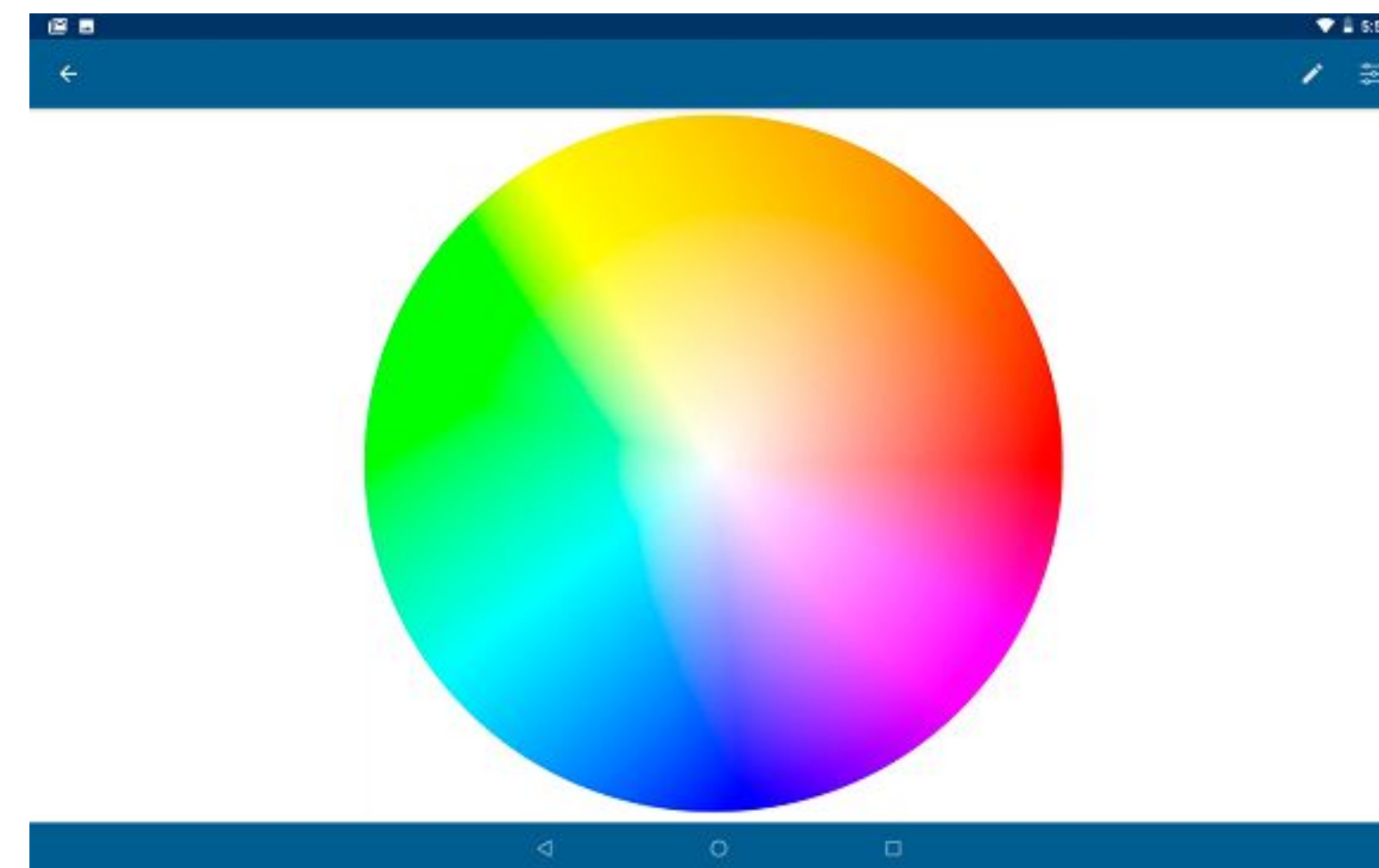


easylabs


# ANGOLO LUMINEA

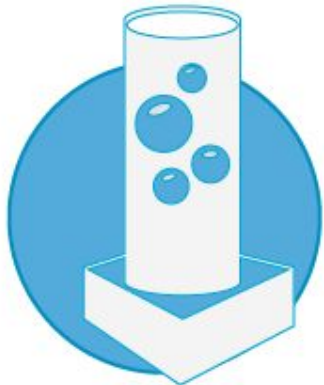

Tubo a bolle Luminea

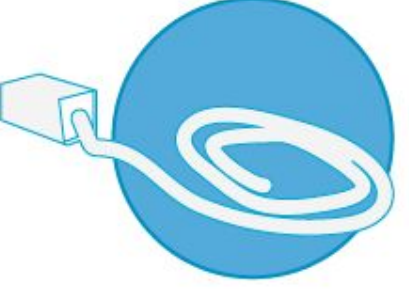

Fibre ottiche Luminea




App Luminea



**Interattivo**



**Terapeutico**



**Scalabile**



**Facile da trasportare**



**Facile da installare**



# GRAZIE, ALLA PROSSIMA!



## INTRODUZIONE ALLE STANZE MULTISENSORIALI SHX

**VAI ALLA PRESENTAZIONE DEL WEBINAR**

**easylabs**  
tecnologie assistive e multisensoriali

Via Venasca 16 - 10138 Torino | 011 4386140 | [stanzemultisensoriali@easylabs.it](mailto:stanzemultisensoriali@easylabs.it)

[www.easylabs.it](http://www.easylabs.it) | [f stanzemultisensorialeasylabs](https://www.facebook.com/stanzemultisensorialeasylabs) |  YouTube