

Sfera luminosa Luminea



La lampada a Sfera Luminea, molto più che una semplice lampada

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione



Sfera luminosa attraente

Questa grande sfera luminosa è una risorsa molto interessante da appendere al soffitto o da posizionare sul pavimento.

Interagisci con la luce come mai prima d'ora.

La nostra lampada a Sfera Luminea può essere utilizzata con controllers di vario tipo: [Pulsantiera a 6 tasti](#), un [Dado gigante](#), un tappetino colorato, o anche con un tablet Android tramite l'[app Luminea](#) per controllare i colori in un modo unico.

Moltiplica le sue possibilità.

Ciò che rende questa fantastica app ancora più attraente è che consente all'utente di controllare uno o più dispositivi Luminea e include anche dozzine di attività integrate. L'interattività dell'App ci aiuta a raggiungere diversi obiettivi terapeutici e/o educativi. Usa le attività divertenti e creative che abbiamo fornito o crea facilmente le tue attività con questa app. È senza limiti!

Oltre a poter far parte di una piccola stanza sensoriale come nella configurazione dell'[Angolo Luminea](#), la **lampada a Sfera Luminea** può anche essere parte del [sistema SHX](#) come parte di un **ambiente multisensoriale** più completo, che moltiplica le possibilità interattive all'interno di un sistema integrato che incorpora i restanti dispositivi all'interno della stanza, **tra cui proiezione, suono, vibrazione, ecc.**

Tutte le funzionalità offerte dal sistema SHX, come **controllo vocale, puntamento oculare**, uso di vari controller tra cui il Tappetino SHX, il Dado SHX, Button 6 e altri dispositivi di accesso sono possibili anche con la nostra Sfera Luminea.

Scopri di più sulle Stanze Multisensoriali SHX e sull'autentica esperienza immersiva [facendo clic qui](#).

Non riuscirai a smettere di guardarlo!

Uno stimolo piacevolmente sorprendente che affascinerà l'utente.

Utile per...

- ? Tracciamento visivo
- ? Attenzione / attenzione
- ? Causa ed effetto
- ? Preferenze / scelte
- ? Memoria
- ? A turno
- ? Integrazione visiva del motore
- ? Comunicazione e abilità sociali
- ? Abilità di conteggio

E molti altri benefici terapeutici, grazie alle sue numerose possibilità interattive.

Adatto a

- Paralisi cerebrale
- Disturbo dello spettro autistico
- Lesioni cerebrali: ictus, trauma cranico ...
- Difficoltà di apprendimento
- Gli anziani
- Deficit visivo
- Bambini piccoli, intervento precoce

Caratteristiche

Dimensioni: sfera di 50 cm di diametro

Alta luminosità

Alimentazione: 220V

Ingresso A per sensore per selezione sequenziale del colore, bolle sempre attive

Ingresso B per sensore per accensione/spengimento della modalità AUTOMATICA sequenziale, sempre con bolle attive (ciclo di 7 colori)

Modalità AUTO: cambio colore ciclico senza controller

Modo Compatibile Luminea

Modo Compatibile SHX

Ingresso/uscita DMX

Collegamento: con cavo 3 poli XLR in dotazione per utilizzo in modalità SHX

Ricevitore a radiofrequenza integrato compatibile con i controller Qinera.

Doppio WiFi (sia per la configurazione che per la connessione alla vostra rete per l'utilizzo in modalità esclusiva Luminea, non SHX)

Può essere montato appeso o posizionato appoggiato su una superficie

DOTAZIONE

Viene fornito la sola Sfera Luminea, senza alcun accessorio se non l'alimentatore ed un cavo XLR per l'utilizzo nell'ambito di una Stanza Multisensoriale SHX.

FUNZIONAMENTO in modalità Luminea indipendente no-SHX (Snoezelen)

Quando la Sfera viene alimentata elettricamente si accende e si illumina. Il colore d'illuminazione cambia in maniera temporizzata.

Se ci si è dotati di un Sensore Button1 la Sfera funzionerà secondo le impostazioni del Button1.

Se ci si è dotati di un sensore singolo con connettore da 3,5mm lo si può collegare ad uno dei due ingressi disponibili:

Ingresso A: permette di cambiare il colore di illuminazione della Sfera in modalità sequenziale con un ciclo di 6 colori e poi lo spegnimento.

Ingresso B: permette di avere una modalità di funzionamento AUTOMATICO con il cambio del colore e la durata della transizione da un colore all'altro in maniera automatica ed autonoma.

In alternativa a queste modalità la Sfera Luminea può essere utilizzata grazie alla app gratuita Luminea scaricabile da Play store per dispositivi Android.

Disponibilità: su richiesta