

## Lampada Luminea



La Lampada Luminea, molto più che una semplice lampada

### Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

### Descrizione



### Incredibile Lampada colorata

Questa incredibile lampada è una risorsa molto interessante, che varia il proprio colore in modalità Luminea o SHX.

#### Interagisci con la luce come mai prima d'ora.

La nostra Lampada Luminea può essere utilizzata con controllers di vario tipo: [Pulsantiera a 6 tasti](#), un [Dado gigante](#), un tappetino colorato, o anche con un tablet Android tramite l'[app Luminea](#) per controllare i colori in un modo unico.

#### Moltiplica le sue possibilità.

Ciò che rende questa fantastica app ancora più attraente è che consente all'utente di controllare uno o più dispositivi Luminea e include anche dozzine di attività integrate. L'interattività dell'App ci aiuta a raggiungere diversi obiettivi terapeutici e/o educativi. Usa le attività divertenti e creative che abbiamo fornito o crea facilmente le tue attività con questa app. È senza limiti!

Oltre a poter far parte di una piccola stanza sensoriale come nella configurazione dell'[Angolo Luminea](#), la **Lampada Luminea** può anche essere parte del [sistema SHX](#) come parte di un **ambiente multisensoriale** più completo, che moltiplica le possibilità interattive all'interno di un sistema integrato che incorpora i restanti dispositivi all'interno della stanza, **tra cui proiezione, suono, vibrazione, ecc.**

Tutte le funzionalità offerte dal sistema SHX, come **controllo vocale, puntamento oculare**, uso di vari controller tra cui il Tappetino SHX, il Dado SHX, Button 6 e altri dispositivi di accesso sono possibili anche con la nostra Lampada Luminea.

Scopri di più sulle Stanze Multisensoriali SHX e sull'autentica esperienza immersiva [facendo clic qui](#).

**Non riuscirai a smettere di guardarlo!**

Uno stimolo piacevolmente sorprendente che affascinerà l'utente.

Utile per...

- ? Tracciamento visivo
- ? Attenzione / attenzione
- ? Causa ed effetto
- ? Preferenze / scelte
- ? Memoria
- ? A turno
- ? Integrazione visiva del motore
- ? Comunicazione e abilità sociali
- ? Abilità di conteggio

E molti altri benefici terapeutici, grazie alle sue numerose possibilità interattive.

Adatto a

- Paralisi cerebrale
- Disturbo dello spettro autistico
- Lesioni cerebrali: ictus, trauma cranico ...
- Difficoltà di apprendimento
- Gli anziani
- Deficit visivo
- Bambini piccoli, intervento precoce

## Caratteristiche

Dimensioni: diametro 35 per 140 cm di altezza

Alta luminosità

Alimentazione: 220V

Ingresso A per sensore per selezione sequenziale del colore, bolle sempre attive

Ingresso B per sensore per accensione/spengimento della modalità AUTOMATICA sequenziale, sempre con bolle attive (ciclo di 7 colori)

Modalità AUTO: cambio colore ciclico senza controller

Modo Compatibile Luminea

Modo Compatibile SHX

Ingresso/uscita DMX

Collegamento: con cavo 3 poli XLR in dotazione per utilizzo in modalità SHX

Ricevitore a radiofrequenza integrato compatibile con i controller Qinera.

Doppio WiFi (sia per la configurazione che per la connessione alla vostra rete per l'utilizzo in modalità esclusiva Luminea, non SHX)

Va posizionato sul pavimento.

## DOTAZIONE

Viene fornito la sola Lampada Luminea, senza alcun accessorio se non l'alimentatore ed un cavo XLR per l'utilizzo nell'ambito di una Stanza Multisensoriale SHX.

## FUNZIONAMENTO in modalità Luminea indipendente no-SHX (Snoezelen)

Quando la Lampada viene alimentata elettricamente si accende e si illumina. Il colore d'illuminazione cambia in maniera temporizzata.

Se ci si è dotati di un Sensore Button1 la Lampada funzionerà secondo le impostazioni del Button1.

Se ci si è dotati di un sensore singolo con connettore da 3,5mm lo si può collegare ad uno dei due ingressi disponibili:

Ingresso A: permette di cambiare il colore di illuminazione della Lampada in modalità sequenziale con un ciclo di 6 colori e poi lo spegnimento.

Ingresso B: permette di avere una modalità di funzionamento AUTOMATICO con il cambio del colore e la durata della transizione da un colore all'altro in maniera automatica ed autonoma.

In alternativa a queste modalità la Lampada Luminea può essere utilizzata grazie alla app gratuita Luminea scaricabile da Play store per dispositivi Android.

**Disponibilità:** su richiesta